



Aparat do drenażu limfatycznego POWER Q8060 z mankietem na rękę i 2 mankietami na nogę


Opis produktu

Power Q8060 to profesjonalny aparat do masażu uciskowego, który współpracuje z **6-komorowymi mankietami** na rękę, nogi, lub na biodra.

Ten nowoczesny aparat posiada **5-calowy wyświetlacz LED**. Obsługę ułatwiają dotykowe przyciski, za pomocą których sterujemy urządzeniem, ustawiając parametry masażu limfatycznego:

- **dziesięć trybów pracy** : A1, A2, B, C1, C2, C3, D1, D2, E1, E2
- **ustawienie czasu zabiegu**: 0-99min.
- **ustawienie ciśnienia masażu pneumatycznego jednakowych dla wszystkich komór lub różnych dla poszczególnych komór w zakresie**: 0-200 mm Hg dla trybów A1, A2, B, E1, E2, 0-130 mm Hg dla trybów C1, C2, C3, D1, D2
- **ustawienie czasu przerwy (odstępu)**: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 sek.
- **ustawienie czasu utrzymywania ciśnienia w komorze identycznego lub różnego dla poszczególnych komór**: (0-15sek.).
- **wyłączenie konkretnej komory mankieta** z pracy

Programy masażu limfatycznego:

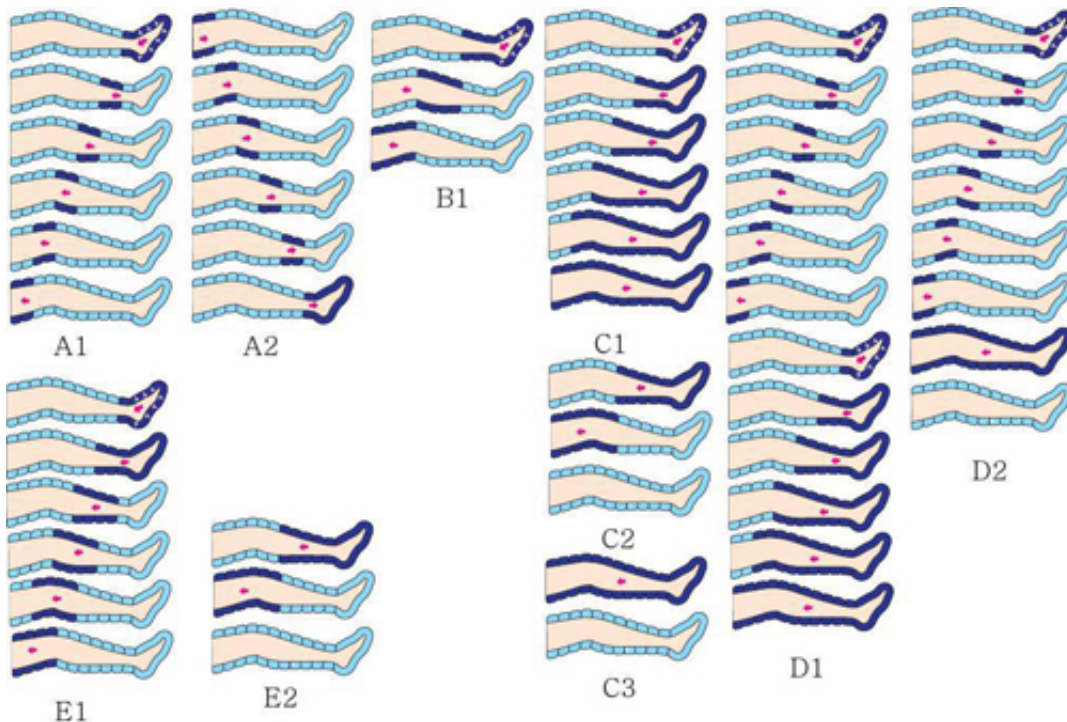

Dodatkowe funkcje aparatu do masażu uciskowego Power Q8060:

- Funkcja Zapis (Save) umożliwiająca zapisanie parametrów masażu

- Funkcja Reset służąca do przywrócenia wartości początkowych

Dane techniczne aparatu do masażu uciskowego Power Q8060:

Wymiary	440 x 330 x 180 mm
Waga	7,5 kg

Wyposażenie:

- mankiet 6-komorowy na nogę - 2 szt.
- mankiet 6-komorowy na rękę - 1 szt.
- przewód powietrzny pojedynczy - 1 szt.
- przewód powietrzny podwójny - 1 szt.

Zestaw **Power Q8060** z 2 mankietami na nogi i mankietem na rękę:


- likwiduje obrzęki różnego pochodzenia
- walczy z zespołem ciężkich nóg
- idealny w profilaktyce przeciwżylakowej
- wspomaga odchudzanie i walkę z cellulitem
- likwiduje ból wynikający z tzw. "zakwasów"
- **idealny dla kobiet po mastektomii** - pozwala walczyć z obrzękami po usunięciu węzłów chłonnych

Przeczytaj:



[5 powodów, dla których warto w swoim gabinecie posiadać aparat do masażu pneumatycznego](#)

[Aparat do masażu uciskowego to niewielkie kompaktowe urządzenie znajdujące zastosowanie w medycynie, odnowie biologicznej i kosmetyce. Szeroki wachlarz zastosowań, przystępna cena oraz prosta obsługa nie wymagająca specjalnych umiejętności sprawiają, że urządzenie to warto postawić w każdym gabinecie fizjoterapii... \[więcej >>\]\(#\)](#)

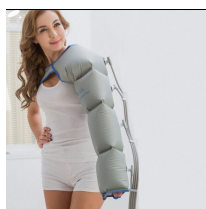

[Aparaty do masażu uciskowego - najczęściej zadawane pytania](#)

[Mimo że obsługa aparatów do drenażu limfatycznego nie wymaga specjalistycznego szkolenia, są to urządzenia medyczne, którymi przy nieodpowiednim użytkowaniu można wyrządzić krzywdę pacjentowi. Często więc pojawiają się różne wątpliwości i pytania odnośnie stosowania aparatów do masażu uciskowego. W tym artykule staramy się Państwu wyjaśnić najważniejsze z nich... \[więcej >>\]\(#\)](#)