



Aparat do drenażu limfatycznego POWER Q8120 z mankietem na rękę i 2 mankietami na nogę

Opis produktu

Power Q8120 to profesjonalny aparat do masażu uciskowego, który współpracuje z **12-komorowymi mankietami** na rękę, nogi, lub na biodra.

Aparat posiada **duży wyświetlacz LED**, na którym prezentowane są aktualne parametry zabiegu. Za pomocą dotykowych przycisków umieszczonych na górnym panelu aparatu do drenażu sterujemy urządzeniem, wybierając spośród takich parametrów, jak:

- **dziesięć trybów pracy** : A1, A2, B, C1, C2, C3, D1, D2, E1, E2
- **ustawienie czasu zabiegu**: 0-99min.
- **ustawienie ciśnienia masażu pneumatycznego jednakowych dla wszystkich komór lub różnych dla poszczególnych komór w zakresie**: 0-200 mm Hg dla trybów A1, A2, B, E1, E2, 0-130 mm Hg dla trybów C1, C2, C3, D1, D2
- **ustawienie czasu przerwy (odstępu)**: 0 - 60 sek.
- **ustawienie czasu utrzymywania ciśnienia w komorze identycznego lub różnego dla poszczególnych komór**: (0-15 sek.).
- **wyłączenie konkretnej komory mankieta** z pracy

Programy masażu limfatycznego:

Dodatkowe funkcje aparatu do masażu uciskowego Power Q8120:

- Funkcja Zapis umożliwiająca zapisanie parametrów masażu
- Funkcja Reset służąca do przywrócenia wartości początkowych

Dane techniczne aparatu do masażu uciskowego Power Q8120:

Wymiary	440 x 330 x 180 mm
Waga	9 kg

Wyposażenie standardowe:

- mankiet 12-komorowy na nogę - 2 szt.
- mankiet 12-komorowy na rękę - 1 szt.
- przewód powietrzny - 2 szt.

Wyposażenie opcjonalne:

- mankiet 12-komorowy na pas biodrowy

Mankiety dołączone do aparatu do masażu uciskowego Power Q8120 posiadają specjalną wielowarstwową konstrukcję: warstwa zewnętrzna wykonana z miękkiego, ale trwałego materiału; warstwa wewnętrzna wykonana z tkaniny bawełnianej (100% bawełny)

Zestaw **Power Q8120 z 2 mankietami na nogi i mankietem na rękę**:

- likwiduje obrzęki różnego pochodzenia

- walczy z zespołem ciężkich nóg
- idealny w profilaktyce przeciwżylakowej
- wspomaga odchudzanie i walkę z cellulitem
- likwiduje ból wynikający z tzw. "zakwasów"
- **idealny dla kobiet po mastektomii** - pozwala walczyć z obrzękami po usunięciu węzłów chłonnych

Masaż uciskowy (presoterapia) wpływa dodatnio na organizm pacjenta poprzez:

- Ułatwienie odpływu krwi żyłnej.
- Pobudzenie układu krwionośnego i limfatycznego, co powoduje wzmożenie zasilania organów w tlen i substancje odżywcze.
- Zwiększenie szybkości usuwania z organizmu produktów rozpadu, likwidację objawów zastoinowych, wchłanianie obrzęków.
- Zmniejszenie oporu krwi w tętnicach, przez co ułatwia się pracę serca.
- Rozszerzenie naczyń krwionośnych i limfatycznych, przez co zwiększa się szybkość obiegu krwi. Dzięki powyższym właściwościom pneumatyczny masaż uciskowy znalazł szerokie zastosowanie w leczeniu i rehabilitacji.

Masaż limfatyczny za pomocą aparatu Power Q8120 jest zabiegiem przyjemnym, relaksującym oraz nie wymagającym wysiłku. Aparat posiada specjalnie skonstruowane mankiety z komorami zachodzącymi na siebie, dzięki czemu nie ma przerw w masażu. Odpowiednio zaprojektowane, posiadające specjalną wielowarstwową budowę mankiety są przeznaczone do terapii kończyn dolnych, górnych i pasa biodrowego. Terapia przeprowadzana jest w lekkim ubraniu. Zabieg jest bezbolesny i nieinwazyjny.

Przeczytaj:



[5 powodów, dla których warto w swoim gabinecie posiadać aparat do masażu pneumatycznego](#)

[Aparat do masażu uciskowego to niewielkie kompaktowe urządzenie znajdujące zastosowanie w medycynie, odnowie biologicznej i kosmetyce. Szeroki wachlarz zastosowań, przystępna cena oraz prosta obsługa nie wymagająca specjalnych](#)



[umiejętności sprawiają, że urządzenie to warto postawić w każdym gabinecie fizjoterapii... więcej >>](#)

[Aparaty do masażu uciskowego - najczęściej zadawane pytania](#)

[Mimo że obsługa aparatów do drenażu limfatycznego nie wymaga specjalistycznego szkolenia, są to urządzenia medyczne, którymi przy nieodpowiednim użytkowaniu można wyrządzić krzywdę pacjentowi. Często więc pojawiają się różne wątpliwości i pytania odnośnie stosowania aparatów do masażu uciskowego. W tym artykule staramy się Państwu wyjaśnić najważniejsze z nich... więcej >>](#)