



Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 15 P

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: P - przejezdna na statywie
- wykorzystywane są do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń
- lampy te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm
- całkowicie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje
- lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze i powierzchnię
- odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakości
- przeznaczone są do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym
- skuteczność funkcjonowania lamp bakteriobójczych potwierdzona badaniami
- wszelkie wymagane certyfikaty

Opis metod używania lamp bakteriobójczych zawiera instrukcja obsługi urządzenia.

Ilości i moc lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania serii NBV na jedno pomieszczenie zależy od wielu zmiennych, takich jak: wielkość, wysokość i ukształtowanie pokoju, wielkość współczynnika odbicia powierzchni (ścian) w pomieszczeniu, temperatura, wilgotność i stopień zapylenia powietrza, odporność mikrobów. Duża ilość czynników, które należy mieć na uwadze przy doborze urządzenia, uniemożliwia jednoznaczne określenie ilości lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania serii NBV w wybranym pomieszczeniu.

Z praktycznej strony możemy założyć, że osiągniemy wystarczający stopień czystości mikrobiologicznej stosując:

- lampę 15W na pow. do 8 m²
- lampę 2x15W na pow. do 12 m²
- lampę 30W na pow. do 15 m²
- lampę 2x30W na pow. do 22 m²

W pomieszczeniu o wys. 2,5m do 3m w warunkach pokojowych.

W zależności od tego, jakie jest zastosowanie pomieszczenia (sala chorych, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, sala operacyjna) lampy NBV możemy włączać na 2 do 8 godz. Aby uzyskać znaczący wynik dezynfekcji powietrza w pomieszczeniu (np. między dwoma zabiegami) lampy uruchamiamy na 15 do 20 minut.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 18 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 15W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 0,9 W / m²
- trwałość promiennika : 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 6-8 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 270 °
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy : IP 20
- rodzaj pracy: ciągła
- wymiary kopuły: 500 x 85 x 135 mm
- masa kopuły: 2 kg
- wysokość statywu: 1800 mm



Eres Medical Sp. z o.o.
📍 Piłuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
@ E-mail: info@eresmedical.com.pl
☎ Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY