



Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 15 PL

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- typ licznika: L-licznika cyfrowy z mikrop procesorem, bez wyświetlacza. Model ten sygnalizuje dźwiękowo chwilę, w której należy dokonać wymiany promiennika. Ten rodzaj licznika doskonale spełnia swoją funkcję w lampach bakteriobójczych bezpośredniego działania.
- sposób montażu: P - przejezdna na statywie
- urządzenie pozytywnie przeszło badania, które potwierdzają jego najwyższą jakość (posiada wymagane certyfikaty)
- lampa emituje promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm
- bakterie, pleśnie, grzyby oraz wirusy poddane działaniu tej lampy ulegają dezaktywacji - przestają być groźne dla człowieka
- za pomocą tej lampy można dokonać skutecznej dezynfekcji powietrza i powierzchni
- odbłyśnik tej lampy jest wykonany z aluminium odbłaskowego
- urządzenie to jest przeznaczone do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych i opatrunkowych, w salach chorych, przychodniach, laboratoriach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym

Instrukcja obsługi lampy bakteriobójczej NBV 15 PL zawiera niezbędne informacje dotyczące sposobów użytkowania tego sprzętu.

To jak skutecznie lampa bakteriobójcza wyeliminuje z powietrza drobnoustroje, zależy od bardzo wielu czynników. Na przykład, na efektywność tego urządzenia ma wpływ wilgotność, temperatura i stopień zapylenia powietrza. Znaczącą rolę odgrywa również wysokość pomieszczenia oraz rodzaj ścian (a dokładniej to, jaka ilość promieni świetlnych odbija się od ich powierzchni). Przed podjęciem decyzji, jaką lampę bakteriobójczą bezpośredniego działania umieścić w danej sali, należy ustalić, jaki rodzaj bakterii, grzybów i drobnoustrojów ma być zwalczany.

Aby osiągnąć w pomieszczeniu wystarczający stopień czystości mikrobiologicznej zaleca się stosowanie:

- lampy 15W na pow. do 8 m²
- lampy 2x15W na pow. do 12 m²
- lampy 30W na pow. do 15 m²
- lampy 2x30W na pow. do 22 m²

Na salach operacyjnych, salach chorych, czy w gabinetach lekarskich i zabiegowych lampa bakteriobójcza powinna działać od 2 do 8 godzin. Natomiast, aby uzyskać efekt wyraźnej dezynfekcji pomieszczenia (na przykład, między zabiegami) urządzenie to uruchamia się zaledwie na 15-20 minut.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 18 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 1x15W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 0,9 W/m²
- trwałość promiennika : 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 6-8 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 270 °
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy : IP 20
- rodzaj pracy: ciągła
- wymiary kopuły: 500 x 85 x 135 mm
- masa kopuły: 2 kg



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- wysokość statywu: 1800 mm
- typ licznika: bez wyświetlacza