



Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 15 S

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu lampy: S - sufitowa
- zastosowane do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniu
- lampy emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm
- bezpowrotnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne mikroorganizmy
- lampa bakteriobójcza gruntownie dezynfekuje powietrze i powierzchnię
- odbłyśnik lampy zrobiony jest z aluminium odbłaskowego wysokiej jakości
- stosowane są na blokach operacyjnych, gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym
- skuteczność działania lamp bakteriobójczych zatwierdzona badaniami
- wszelkie wymagane certyfikaty

Dokładny opis sposobów i metod użytkowania lamp bakteriobójczych zawiera instrukcja obsługi lamp.

Dobór ilości i mocy lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania serii NBV jest zależne od dodatkowych czynników takich, jak: wysokość i kształt pomieszczenia, wielkość współczynnika odbicia powierzchni (ścian) w pomieszczeniu, temperatura, wilgotność i stopień zapylenia powietrza, odporność drobnoustrojów. Niezbędne parametry wymagane przy wyborze, uniemożliwiają ujęcie szczegółowej i jednoznacznej reguły definiującej ilość lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania serii NBV na jedno pomieszczenie.

Z praktycznego punktu widzenia można założyć, że uzyskamy wystarczający stopień czystości mikrobiologicznej stosując:

- lampę 15W na pow. do 8 m²
- lampę 2x15W na pow. do 12 m²
- lampę 30W na pow. do 15 m²
- lampę 2x30W na pow. do 22 m²

W pomieszczeniu, którego wysokość wynosi 2,5m do 3m.

W zależności od tego, jakie jest przeznaczenie pomieszczenia (gabinet lekarski lub zabiegowy, sala chorych, sala operacyjna) lampy pozostawiamy włączone na 2 do 8 godz. Aby uzyskać doraźny efekt dezynfekcji powietrza w pomieszczeniu (np. między dwoma zabiegami) lampy włączamy na 15 do 20 minut.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 18 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 15W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 0,9 W / m²
- trwałość promiennika : 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 6-8 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 230 °
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy : IP 20
- rodzaj pracy: ciągła
- wymiary kopuły: 500 x 85 x 135 mm
- masa kopuły: 2 kg
- długość wysięgnika: 500 mm



Eres Medical Sp. z o.o.
📍 Pluszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
@ E-mail: info@eresmedical.com.pl
☎ Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY