



Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 15 SLW

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

- typ licznika: LW - licznik cyfrowy z mikroprocesorem z wyświetlaczem 4-polowym LED, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika. Możliwość samodzielnego podłączenia do wcześniej zakupionych lamp bezpośredniego działania i przepływowych
- sposób montażu: S - sufitowa
- wynikiem stosowania tego urządzenia jest podniesienie poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń
- emitowane promieniowanie: UV-C o długości fali 253,7 nm
- nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje
- powietrze i powierzchnia w pomieszczeniu, w którym została użyta ta lampa, są skutecznie zdezynfekowane
- wysokojakościowy odbłyśnik (materiał: aluminium odbłaskowe)
- przeznaczenie: stosowanie na blokach operacyjnych (oraz innych salach szpitalnych), w gabinetach zabiegowych, a także w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz kosmetycznym
- skuteczność tego urządzenia potwierdzają badania oraz liczne certyfikaty

Przed zakupem lampy bakteriobójczej bezpośredniego działania powinni Państwo określić, jakie warunki panują w pomieszczeniu, w którym zostanie zamontowane to urządzenie. Po pierwsze, należy uwzględnić wysokość oraz powierzchnię danej sali. Ważne są również bardziej szczegółowe parametry, takie jak: wilgotność, temperatura oraz zapylenie powietrza, a także rodzaj występujących drobnoustrojów i bakterii. Powinno się również ocenić, jaką ilość promieniowania odbijają ściany w danym pomieszczeniu.

Przy wyborze odpowiedniej lampy bezpośredniego działania bardzo pomocne okażą się poniższe wskazówki. Wystarczającą sterylność mikrobiologiczną w pomieszczeniu do 3 m wysokości zapewni:

- lampa 15W na pow. do 8 m²
- lampa 2x15W na pow. do 12 m²
- lampa 30W na pow. do 15 m²
- lampa 2x30W na pow. do 22 m²

W zależności od przeznaczenia pomieszczenia (sala chorych, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, sala operacyjna) lampy włączamy na 2 do 8 godz. Aby uzyskać wyraźny efekt dezynfekcji powietrza w pomieszczeniu (np. między dwoma zabiegami) lampy włączamy na 15 do 20 minut.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 18 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 15W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 0,9 W / m²
- trwałość promiennika: 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 6-8 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 230°
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- rodzaj pracy: ciągła
- wymiary kopuły: 500 x 85 x 135 mm



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- masa kopuły: 2 kg
- długość wysięgnika: 500 mm
- typ licznika: z wyświetlaczem 4-polowym