

Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 2x30 N



Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: N- uniwersalna (ścienne-sufitowa)
- głównym celem zastosowania tego urządzenia jest podniesienie i utrzymanie poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń
- urządzenia te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm
- lampa ta nieodwracalnie dezaktywuje wirusy i drobnoustroje
- lampa bakteriobójcza skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnię pomieszczenia
- odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego gwarantuje najwyższą jakość urządzenia
- przeznaczone są do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym
- skuteczność działania lamp bakteriobójczych potwierdzona jest badaniami i certyfikatami

Korzystanie z lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania nie generuje wysokich kosztów eksploatacji. Aby zapewnić danemu pomieszczeniu wymaganą sterylność mikrobiologiczną urządzenia tego typu powinny pracować w szpitalach, na salach operacyjnych, w pokojach zabiegowych czy w przychodniach od 2 do 8 godzin. Natomiast w celu szybkiej dezynfekcji pomieszczenia (na przykład między zabiegami) wystarczy włączyć ten model lampy na zaledwie 15-20 minut.

Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania są jedną z najskuteczniejszych metod dezynfekcji powietrza i powierzchni w salach medycznych, ale również w salonach kosmetycznych i w przemyśle spożywczym. Aby właściwie dobrać moc i rodzaj lampy należy określić:

- wymiary pomieszczenia (szczególnie trzeba zwrócić uwagę na jego wysokość);
- poziom zapylenia, wilgotność i temperaturę powietrza;
- rodzaj drobnoustrojów;
- ilość promieniowania, jaką odbijają ściany oraz przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 66 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 3,6 W / m²
- trwałość promiennika: 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200°
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- rodzaj pracy: ciągła
- wymiary kopuły: 960 x 85 x 145 mm
- masa kopuły: 5 kg
- długość wysięgnika: 120 mm