



Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 2x30 NL

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- licznik: L-licznik cyfrowy z mikroprocesorem, bez wyświetlacza. Posiada funkcję sygnalizacji dźwiękowej momentu wymiany promiennika. Ten model jest montowany w lampach bezpośredniego działania.
- sposób montażu lampy: N - uniwersalna (ściennie-sufitowa)
- podstawowym zadaniem produktu jest podniesienie oraz utrzymanie poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniu
- lampa bezpośredniego działania emituje promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm
- urządzenie bezpowrotnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśń, grzyby oraz wszelkie inne mikroorganizmy
- lampa bakteriobójcza gruntownie dezynfekuje powietrze i powierzchnię
- odbłyśnik lampy wykonano z aluminium odblaskowego wysokiej jakości
- urządzenie wykorzystywane jest na blokach operacyjnych, salach zabiegowych, w szpitalach, w laboratoriach i przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz kosmetycznym, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach
- działanie lamp bakteriobójczych potwierdzone jest badaniami oraz wszelkimi wymaganymi certyfikatami

Instrukcja obsługi lamp bakteriobójczych zawiera wszelkie konieczne informacje na temat obsługi oraz metod użytkowania tego urządzenia.

Moc lampy bakteriobójczej i rodzaj promieniowania, które powinno być emitowane, dobierane jest biorąc pod uwagę rodzaj pomieszczenia, jak również jego wymiary (szczególnie wysokość) oraz panujące warunki (w tym: temperaturę, wilgotność, stopień zapylenia powietrza). Ważne jest również współczynnik odbicia powierzchni, przy pomocy którego określa się ilość promieniowania odbitą od ścian.

Chociaż nie ma jednoznacznych wytycznych, można założyć, że uzyskamy wystarczający stopień czystości mikrobiologicznej, stosując:

- lampę 15W na pow. do 8 m²
- lampę 2x15W na pow. do 12 m²
- lampę 30W na pow. do 15 m²
- lampę 2x30W na pow. do 22 m²

Dane te dotyczą pomieszczeń, których wysokość wynosi do 3 m.

W zależności od pomieszczenia oraz jego przeznaczenia (gabinet lekarski lub zabiegowy, sala chorych, sala operacyjna) lampy pozostawiamy włączone na 2 do 8 godz. Aby uzyskać znaczny efekt dezynfekcji powietrza w pomieszczeniu (np. między dwoma zabiegami), lampa powinna pracować przez około 20 minut.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 66 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 3,6 W / m²
- trwałość promiennika : 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200°
- klasa zabezpieczenia ppow.: I



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- typ obudowy : IP 20
 - rodzaj pracy: ciągła
 - wymiary kopuły: 960 x 85 x 145 mm
 - masa kopuły: 5 kg
 - długość wysięgnika: 120 mm
 - typ licznika: bez wyświetlacza
-