



Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 2x30 NLW

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- skuteczność tej lampy potwierdzają liczne testy oraz wszelkie wymagane certyfikaty
- licznik: LW-licznik cyfrowy z mikrop procesorem, który wyposażono w wyświetlacz 4-polowy LED. Funkcjonalność tego modelu zwiększa również możliwość samodzielnego podłączenia go do wcześniej zakupionych lamp bezpośredniego działania i przepływowych
- sposób montażu lampy: N - uniwersalna (ściennie-sufitowa)
- podstawowym zadaniem produktu jest podniesienie oraz utrzymanie poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniu
- urządzenie to emituje promieniowanie: UV-C o długości fali 253,7 nm
- lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania bezpowrotnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne mikroorganizmy
- skutek użytkowania tego urządzenia: dezynfekcja powietrza i powierzchni
- odbłyśnik lampy: wykonany z wysokojakościowego aluminium odbłaskowego
- przeznaczenie: do sal operacyjnych, gabinetów lekarskich i zabiegowych, a także do pomieszczeń przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego

Przyjmuje się, że aby osiągnąć wystarczający poziom czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniach o wysokości 2,5-3 m, należy zastosować:

- lampę 15W na pow. do 8 m²
- lampę 2x15W na pow. do 12 m²
- lampę 30W na pow. do 15 m²
- lampę 2x30W na pow. do 22 m²

Jednak, żeby mieć pewność, że wybrane urządzenie jest odpowiednie do danego pomieszczenia, powinno się jeszcze zwrócić uwagę na temperaturę w nim panującą, a także na wilgotność i zapylenie powietrza. Wymiary sali i współczynnik odbijania promieni przez ściany jest również bardzo istotny.

W zależności od pomieszczenia oraz jego przeznaczenia (gabinet lekarski lub zabiegowy, sala chorych, sala operacyjna) lampy pozostawiamy włączone na 2 do 8 godz. Aby uzyskać znaczny efekt dezynfekcji powietrza w pomieszczeniu (np. między dwoma zabiegami), lampa powinna pracować przez około 20 minut.

Wszelkie niezbędne informacje na temat tej lampy bakteriobójczej bezpośredniego działania znajdują się w instrukcji użytkowania.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 66 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 3,6 W / m²
- trwałość promiennika : 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200°
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy : IP 20
- rodzaj pracy: ciągła



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- wymiary kopuły: 960 x 85 x 145 mm
- masa kopuły: 5 kg
- długość wysięgnika: 120 mm
- typ licznika: z wyświetlaczem 4-polowym