



Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 2x30 P

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: P - przejezdna na statywie
- przeznaczeniem produktu jest zapewnienie poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń
- urządzenia te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm
- nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje
- lampa bakteriobójcza skutecznie odkaża powietrze i powierzchnię
- odbłyśnik lampy zrobiony jest z wysokiej jakości aluminium odblaskowego
- produkty przeznaczone są do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym
- skuteczność działania lamp bakteriobójczych poparta jest badaniami
- produkty posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty

Dokładna informacja o sposobach i metodach stosowania lamp bakteriobójczych znajduje się w instrukcji użytkowania lamp.

Dobór ilości i mocy lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania serii NBV wynika z wielu czynników, takich jak: wysokość pomieszczenia, jego układ, wielkość współczynnika odbicia powierzchni (ścian) w pomieszczeniu, temperatura, wilgotność i stopień zapylenia powietrza, odporność drobnoustrojów. Znaczna ilość parametrów, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyborze uniemożliwia sformułowanie jednej, prostej reguły określającej jednoznacznie ilość lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania serii NBV w docelowym pomieszczeniu.

Z praktycznego punktu widzenia można założyć, że uzyskamy wystarczający stopień czystości mikrobiologicznej stosując:

- lampę 15W na pow. do 8 m²
- lampę 2x15W na pow. do 12 m²
- lampę 30W na pow. do 15 m²
- lampę 2x30W na pow. do 22 m²

W pomieszczeniu o wys. 2,5m do 3m w warunkach pokojowych.

W zależności od tego, jakie jest przeznaczenie pomieszczenia (sala chorych, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, sala operacyjna) lampy włączamy na 2 do 8 godz. Aby uzyskać doraźny efekt dezynfekcji powietrza w pomieszczeniu (np. między dwoma zabiegami) lampy włączamy na 15 do 20 minut.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 66 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 3,6 W / m²
- trwałość promiennika: 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 270°
- klasa zabezpieczenia ppor.: I



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- typ obudowy: IP 20
 - rodzaj pracy: ciągła
 - wymiary kopuły: 960 x 85 x 145 mm
 - masa kopuły: 5 kg
 - wysokość statywu : 1800 mm
-