



Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 2x30 PLW

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- typ licznika: LW - licznik cyfrowy z mikroprocesorem z wyświetlaczem 4-polowym LED, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika. Istnieje możliwość samodzielnego podłączenia tego modelu do wcześniej zakupionych lamp bezpośredniego działania i przepływowych
- sposób montażu: P - przejezdna na statywie
- wynikiem stosowania tego urządzenia jest podniesienie poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń
- emitowane promieniowanie: UV-C o długości fali 253,7 nm
- nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje
- powietrze i powierzchnia w pomieszczeniu, w którym została użyta ta lampa, są skutecznie zdezynfekowane
- wysokojakościowy odbłyśnik (materiał: aluminium odblaskowe)
- przeznaczenie: stosowanie na blokach operacyjnych (oraz innych salach szpitalnych), w gabinetach zabiegowych, a także w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz kosmetycznym
- skuteczność tego urządzenia potwierdzają badania oraz liczne certyfikaty

Przed zakupem lampy bakteriobójczej bezpośredniego działania powinni Państwo określić, jakie warunki panują w pomieszczeniu, w którym zostanie zamontowane to urządzenie.

Przed wszystkim należy zwrócić uwagę na następujące parametry:

- wilgotność i zapylenie powietrza;
- temperaturę w danym pomieszczeniu;
- rodzaj i odporność drobnoustrojów i bakterii;
- ilość promieniowania świetlnego, jaką odbijają ściany i przedmioty umieszczone w pomieszczeniu;

Przykładowe zastosowanie lamp ze względu na pomieszczenie:

- lampę 15W na pow. do 8 m²
- lampę 2x15W na pow. do 12 m²
- lampę 30W na pow. do 15 m²
- lampę 2x30W na pow. do 22 m²

(Parametry dla pomieszczeń o wysokości do 3 m).

W zależności od przeznaczenia pomieszczenia (sala chorych, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, sala operacyjna) lampy włączamy na 2 do 8 godz. Aby uzyskać wyraźny efekt dezynfekcji powietrza w pomieszczeniu (np. między dwoma zabiegami) lampy włączamy na 15 do 20 minut.



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
 - pobór mocy: 66 W
 - element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30W
 - natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 3,6 W / m²
 - trwałość promiennika: 8000 h
 - dezynfekowana powierzchnia: do 22 m²
 - obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 270°
 - klasa zabezpieczenia ppor.: I
 - typ obudowy: IP 20
 - rodzaj pracy: ciągła
 - wymiary kopuły: 960 x 85 x 135 mm
 - masa kopuły: 3 kg
 - długość wysięgnika: 1800 mm
 - typ licznika: z wyświetlaczem 4-polowym
-