



Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 2x30 S

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: S - sufitowa
- produkty te używane są do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń
- lampy emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm
- nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje
- lampa bakteriobójcza skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnię
- odbłyśnik wyprodukowany został z aluminium odblaskowego wysokiej jakości
- produkty te wykorzystywane są na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym
- niezawodność funkcjonowania lamp bakteriobójczych potwierdzona jest badaniami
- wszelkie wymagane certyfikaty

Opis sposobów i metod stosowania lamp bakteriobójczych znajduje się w instrukcji użytkowania lamp.

Dobór ilości i mocy lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania serii NBV wynika z czynników, takich jak: wysokość pomieszczenia, jego kształt, wielkość współczynnika odbicia powierzchni (ścian) w pomieszczeniu, temperatura, wilgotność i stopień zapylenia powietrza, odporność drobnoustrojów. Znaczna ilość zmiennych, które należy mieć na uwadze przy doborze uniemożliwia sformułowanie prostej reguły trafnie określającej ilość lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania serii NBV na jedno pomieszczenie.

Z praktycznego punktu widzenia możemy stwierdzić, że osiągniemy wystarczający stopień czystości mikrobiologicznej używając:

- lampę 15W na pow. do 8 m²
- lampę 2x15W na pow. do 12 m²
- lampę 30W na pow. do 15 m²
- lampę 2x30W na pow. do 22 m²

W pomieszczeniu o wys. 2,5m do 3m w warunkach pokojowych.

Czas działania lamp będzie zależał od przeznaczenia pomieszczenia (sala chorych, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, sala operacyjna). Za wystarczający przyjmuje się okres od 2 do 8 godzin. Aby uzyskać znaczący efekt dezynfekcji powietrza w pomieszczeniu (np. między dwoma zabiegami) lampy włączamy na 15 do 20 minut.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 66 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 3,6 W / m²
- trwałość promiennika: 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 230°
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- rodzaj pracy: ciągła
- wymiary kopuły: 960 x 85 x 145 mm



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- masa kopuły: 5 kg
- długość wysięgnika: 500 mm