



Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 2x30 SL

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: S - sufitowa
- służą do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń
- urządzenia te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm
- urządzenie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje
- lampa bakteriobójcza dezynfekuje znacząco powietrze i powierzchnię
- odbłyśnik wykonany został z aluminium odbłaskowego wysokiej jakości
- urządzenia stosowane są na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym
- urządzenie posiada wszelkie niezbędne certyfikaty

Szczegółowy opis zawierający metody stosowania lamp bakteriobójczych znajduje się w instrukcji użytkowania lamp.

Istnieje wiele czynników wpływających na ilość oraz moc lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania serii NBV, w tym: wysokość pomieszczenia, jego kształt, wielkość współczynnika odbicia powierzchni (ścian) w pomieszczeniu, temperatura, wilgotność i stopień zapylenia powietrza, odporność drobnoustrojów. Tak znaczna ilość parametrów do uwzględnienia powoduje, że niemożliwe jest sformułowanie jednoznacznej, prostej reguły, która precyzyjnie określałaby ilość lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania serii NBV w konkretnym pomieszczeniu.

Z praktycznego punktu widzenia zakłada się, że osiągniemy wystarczający stopień czystości mikrobiologicznej stosując:

- lampę 15 W na pow. do 8 m²
- lampę 2x15 W na pow. do 12 m²
- lampę 30 W na pow. do 15 m²
- lampę 2x30 W na pow. do 22 m²

Dotyczy to pomieszczeń o wys. do 3 m w warunkach pokojowych.

W zależności od przeznaczenia pomieszczenia (sala chorych, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, sala operacyjna) lampy uruchamiamy na 2 do 8 godz. Dla wyraźnego efektu dezynfekcji powietrza w pomieszczeniu (np. między dwoma zabiegami) lampy powinny zostać włączone na 15 do 20 minut.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 66 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 3,6 W / m²
- trwałość promiennika: 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 230°
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- rodzaj pracy: ciągła
- wymiary kopuły: 960 x 85 x 145 mm
- masa kopuły: 5 kg
- długość wysięgnika: 500 mm



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- typ licznika: bez wyświetlacza