



Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 2x30 SLW

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- skuteczność tej lampy potwierdzają profesjonalne badania
- nasz artykuł zdobył również uznanie wielu instytucji, co potwierdzają certyfikaty
- sposób montażu lampy: S-sufitowa
- licznik: LW-licznik cyfrowy z mikroprocesorem, który wyposażono w wyświetlacz 4-polowy LED. Funkcjonalność tego modelu zwiększa również możliwość samodzielnego podłączenia go do wcześniej zakupionych lamp bezpośredniego działania i przepływowych
- najważniejszym zadaniem produktu jest podniesienie oraz utrzymanie poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniu
- urządzenie to emituje promieniowanie: UV-C o długości fali 253,7 nm
- lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania bezpowrotnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne mikroorganizmy
- odbłyśnik lampy: został wykonany z wysokojakościowego aluminium odblaskowego
- cel: dezynfekcja powietrza i powierzchni
- przeznaczenie: do sal operacyjnych, gabinetów lekarskich i zabiegowych, a także do pomieszczeń przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego

Instrukcja obsługi tej lampy bakteriobójczej bezpośredniego działania zawiera cenne uwagi na temat metod i stosowania tego urządzenia.

Przy doborze urządzenia do danego pomieszczenia należy uwzględnić wiele parametrów, aby lampa bakteriobójcza skutecznie dezynfekowała powietrze. Ważną rolę odgrywa między innymi: temperatura, wilgotność i stopień zapylenia, a także współczynnik odbijania promieni świetlnych od powierzchni znajdujących się w danej sali. Najważniejsze jest jednak odpowiednie ocenienie wymiarów pomieszczenia (ze szczególnym uwzględnieniem jego wysokości).

Aby osiągnąć wystarczającą sterylność mikrobiologiczną, powinno się zastosować w pomieszczeniu do 3 m wysokości:

- lampę 15W na pow. do 8 m²
- lampę 2x15W na pow. do 12 m²
- lampę 30W na pow. do 15 m²
- lampę 2x30W na pow. do 22 m²

Oczywiście, to na jak długo należy włączać lampę bakteriobójczą bezpośredniego działania, zależy od charakteru i przeznaczenia pomieszczenia. Na przykład w gabinetach lekarskich urządzenie to powinno pracować około 8 godzin dziennie. Natomiast, aby uzyskać znaczny efekt dezynfekcji powietrza w pomieszczeniu (np. między dwoma zabiegami), lampa powinna pracować przez około 20 minut.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 66 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 3,6 W / m²
- trwałość promiennika : 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 230°
- klasa zabezpieczenia ppor.: I



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- typ obudowy : IP 20
 - rodzaj pracy: ciągła
 - wymiary kopuły: 960 x 85 x 145 mm
 - masa kopuły: 5 kg
 - długość wysięgnika: 500 mm
 - typ licznika: z wyświetlaczem 4-polowym
-