

Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 30 N



Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- typ: N - uniwersalna, ścienna-sufitowa lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania
- przeznaczenie: podniesienie oraz utrzymanie poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniach różnego rodzaju
- cel: nieodwracalna dezaktywacja wszelkiego rodzaju bakterii, wirusów, pleśni, grzybów oraz drobnoustrojów
- skutek działania: skuteczna dezynfekcja powietrza i powierzchni naświetlanej
- przeznaczenie: stosowanie na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych i opatrunkowych, na salach operacyjnych, w przychodniach, laboratoriach i aptekach, a także w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym
- dodatkowe informacje: lampa ta została wyposażona w wysoko jakościowy aluminiowy odbłyśnik; ponadto posiada wszelkie wymagane certyfikaty, a jej skuteczność jest potwierdzona badaniami

Informacje na temat tego jak użytkować oraz w jakich sytuacjach stosować tę lampę bakteriobójczą, znajdą Państwo w instrukcji obsługi.

To w jaki sposób należy dobrać odpowiednią moc lampy bakteriobójczej bezpośredniego działania, zależy od bardzo wielu czynników, między innymi od kształtu i metrażu pomieszczenia (głównie od jego wysokości). Ponadto należy wziąć pod uwagę również stopień, w jakim ściany i przedmioty znajdujące się w pokoju odbijają światło. Ważne są również parametry takie jak: wilgotność, stopień zapylenia powietrza oraz odporność drobnoustrojów. Jak więc łatwo zauważyć, trudno jednoznacznie określić, ile lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania serii NBV powinno się znaleźć w danym pomieszczeniu.

Uogólniając, można przyjąć, że wystarczającą czystość mikrobiologiczną osiągnie się, montując w pomieszczeniu o wysokości od 2,5 do 3 m:

- lampę 15W na pow. do 8 m²
- lampę 2x15W na pow. do 12 m²
- lampę 30W na pow. do 15 m²
- lampę 2x30W na pow. do 22 m²

Czas przez jaki lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania powinna działać, zależy od rodzaju pomieszczenia a także jego przeznaczenia. Na przykład, w salach chorych, gabinetach zabiegowych czy w salach operacyjnych lampy włącza się na 2 do 8 godzin. Natomiast w celu dezynfekcji pomieszczenia (na przykład, w przerwie między zabiegami) sprzęt tego typu uruchamiany jest na około 15-20 minut.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 33 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 2,3 W / m²
- trwałość promiennika: 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200°
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- rodzaj pracy: ciągła
- wymiary kopuły: 960 x 85 x 135 mm
- masa kopuły: 3 kg



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- długość wysięgnika: 120 mm