



Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 30 NL

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- L-licznik cyfrowy z mikroprocesorem, bez wyświetlacza z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika. Ten typ licznika przeznaczony jest do lamp bezpośredniego działania.
- sposób montażu: N - uniwersalna (ścienne-sufitowa)
- dzięki tej lampie bakteriobójczej podnoszą Państwo poziom czystości mikrobiologicznej
- emitowane promieniowanie: UV-C o długości fali 253,7 nm
- cel: dezaktywacja wirusów, pleśni, grzybów oraz drobnoustrojów
- skutek działania: skuteczna dezynfekcja powietrza i powierzchni
- odbłyśnik: element ten jest wykonany z aluminium, co gwarantuje najwyższą jakość tego urządzenia
- przeznaczenie: lampę bakteriobójczą stosuje się w instytutach medycznych, szpitalach oraz przychodniach, a ponadto w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym
- skuteczność tej lampy potwierdzono podczas badań; świadczą o niej również liczne certyfikaty

Wszystkim użytkownikom tej lampy bakteriobójczej (bezpośredniego działania) zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. To w niej zostały zamieszczone wszystkie informacje dotyczące metod stosowania tego urządzenia.

Odpowiednie dobranie mocy i rodzaju lampy bakteriobójczej jest stosunkowo trudne. Należy wcześniej określić wiele czynników: wymiary pomieszczenia, rodzaj drobnoustrojów, wilgotność, temperaturę i zapylenie powietrza. Istotny jest także współczynnik odbicia światła od powierzchni ścian i przedmiotów umieszczonych w danej sali.

Odpowiedni stopień czystości mikrobiologicznej osiągnie się, stosując:

- lampę 15W na pow. do 8 m²
- lampę 2x15W na pow. do 12 m²
- lampę 30W na pow. do 15 m²
- lampę 2x30W na pow. do 22 m²

Zaleca się, aby włączać lampy w pomieszczeniach o standardowej wysokości (do 3m) na około 2-8 godzin dziennie, a przed zabiegami na 15 do 20 minut.

Ten rodzaj lampy bezpośredniego działania doskonale sprawuje się w gabinetach lekarskich i zabiegowych oraz w szpitalach.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 33 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 2,3 W/m²
- trwałość promiennika: 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200°
- klasa zabezpieczenia ppor.: I



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- typ obudowy: IP 20
 - rodzaj pracy: ciągła
 - wymiary kopuły: 960 x 85 x 135 mm
 - masa kopuły: 3 kg
 - długość wysięgnika: 120 mm
 - typ licznika: bez wyświetlacza
-