

Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 30 NLW



Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- typ licznika: LW - licznik cyfrowy z mikroprocesorem z wyświetlaczem 4-polowym LED, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika. Możliwość samodzielnego podłączenia do wcześniej zakupionych lamp bezpośredniego działania i przepływowych
- sposób montażu: N - uniwersalna (ściennie-sufitowa)
- wynikiem stosowania tego urządzenia jest podniesienie poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń
- emitowane promieniowanie: UV-C o długości fali 253,7 nm
- nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje
- powietrze i powierzchnia w pomieszczeniu, w którym została użyta ta lampa, są skutecznie zdezynfekowane
- wysokojakościowy odbłyśnik (materiał: aluminium odblaskowe)
- przeznaczenie: stosowanie na blokach operacyjnych (oraz innych salach szpitalnych), w gabinetach zabiegowych, a także w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz kosmetycznym
- skuteczność tego urządzenia potwierdzają badania oraz liczne certyfikaty

Przed doбором odpowiedniej lampy bakteriobójczej bezpośredniego działania, trzeba ocenić, jaką odporność wykazują bakterie i drobnoustroje, które będą dezaktywowane. Ponadto należy zdefiniować poziom zapylenia powietrza oraz jego wilgotność i temperaturę. Istotne są także wymiary pomieszczenia (szczególnie jego wysokość).

Uproszczając, uznaje się, że wystarczającą czystość mikrobiologiczną uzyskuje się, naświetlając pomieszczenie o wysokości do 3 m:

- lampą 15W na pow. do 8 m²
- lampą 2x15W na pow. do 12 m²
- lampą 30W na pow. do 15 m²
- lampą 2x30W na pow. do 22 m²

Każde pomieszczenie wymaga innego czasu naświetlania. Specjaliści zalecają włączanie lamp bezpośredniego działania w gabinetach lekarskich, salach szpitalnych oraz w pokojach zabiegowych na ok 2 do 8 godzin dziennie. Szybki efekt dezynfekcji powietrza można uzyskać, włączając urządzenie pomiędzy zabiegami na 20 minut.

Pozostałe niezbędne informacje dotyczące obsługi i stosowania tej lampy bezpośredniego zasięgu znajdują Państwo w instrukcji użytkowania.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 33 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 2,3 W / m²
- trwałość promiennika: 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200°
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- rodzaj pracy: ciągła
- wymiary kopuły: 960 x 85 x 135 mm
- masa kopuły: 3 kg
- długość wysięgnika: 120 mm



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- typ licznika: z wyświetlaczem 4-polowym