



Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 30 P

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: P - przejezdna na statywie
- urządzenie pozytywnie przeszło badania, które potwierdzają jego najwyższą jakość
- lampy te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm
- bakterie, pleśnie, grzyby oraz wirusy poddane działaniu tej lampy ulegają dezaktywacji
- najważniejszym zadaniem tej lampy bakteriobójczej jest dezynfekcja powietrza i powierzchni
- aluminiowy odbłyśnik świadczy o wysokiej jakości urządzenia
- lampa posiada również wszelkie wymagane certyfikaty
- urządzenie to jest przeznaczone do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych i opatrunkowych, w salach chorych, przychodniach, laboratoriach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym

Instrukcja obsługi lampy bakteriobójczej (bezpośredniego działania) NBV 30 P zawiera porady dotyczące sposobów i metod stosowania tego urządzenia.

Efektywność tej lampy bakteriobójczej w znacznej mierze zależy od wilgotności oraz temperatury, jaka panuje w danym pomieszczeniu. Ważną rolę odgrywa również jego wysokość oraz kształt. Ilość drobnoustrojów w powietrzu i stopień zapylenia także nie są obojętne dla działania tej lampy bakteriobójczej. Odbijanie promieniowania przez fakturę ścian – to również jeden z najistotniejszych czynników podczas doboru odpowiedniej lampy bakteriobójczej.

Specjaliści podpowiadają, jak w prosty sposób dobrać odpowiednie urządzenie, aby osiągnąć w pomieszczeniu wystarczający stopień czystości mikrobiologicznej. Poniższe ustalenia dotyczą pokoi (sal) do 3 m wysokości. Zaleca się stosowanie:

- lampy 15W na pow. do 8 m²
- lampy 2x15W na pow. do 12 m²
- lampy 30W na pow. do 15 m²
- lampy 2x30W na pow. do 22 m²

Na salach operacyjnych, salach chorych, czy w gabinetach lekarskich i zabiegowych lampa bakteriobójcza powinna działać od 2 do 8 godzin. Natomiast, aby uzyskać efekt doraźnej dezynfekcji pomieszczenia (na przykład, między zabiegami) urządzenie to uruchamia się zaledwie na 15-20 minut.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 33 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 2,3 W / m²
- trwałość promiennika : 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 270 °
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy : IP 20
- rodzaj pracy: ciągła
- wymiary kopuły: 960 x 85 x 135 mm
- masa kopuły: 3 kg
- wysokość statywu: 1800 mm