



Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 30 PL

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- L - licznik cyfrowy zawierający mikro-procesor, nie posiada wyświetlacza, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika, montowany w lampach bezpośredniego działania.
- sposób montażu lampy: P - przejezdna na statywie
- lampy wykorzystuje się do podniesienia i zachowania poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniu
- emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm
- lampy dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne mikroorganizmy
- urządzenie gruntownie dezynfekuje powietrze i powierzchnię
- odbłyśnik lampy zrobiony jest z aluminium odblaskowego wysokiej jakości
- lampy stosuje się na blokach operacyjnych, gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym
- skuteczność działania lamp bakteriobójczych potwierdzona jest badaniami
- produkt posiada wszelkie wymagane certyfikaty

Wybór odpowiedniej ilości i mocy lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania serii NBV zależy od następujących czynników: wysokość oraz układ pomieszczenia, wielkość współczynnika odbicia powierzchni (ścian) w pomieszczeniu, temperatura, wilgotność i stopień zapylenia powietrza, odporność drobnoustrojów. Ilość dodatkowych parametrów, nie pozwala na to, aby zdefiniować szczegółową i jednoznaczną regułę definiującą ilość lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania serii NBV na jedno pomieszczenie.

Z praktycznego punktu widzenia można założyć, że wystarczający stopień czystości mikrobiologicznej możemy uzyskać stosując:

- lampę 15 W na pow. do 8 m²
- lampę 2x15 W na pow. do 12 m²
- lampę 30 W na pow. do 15 m²
- lampę 2x30 W na pow. do 22 m²

W pomieszczeniu, którego wysokość wynosi do 3 m.

W zależności od tego, jakie jest zastosowanie pomieszczenia (gabinet lekarski lub zabiegowy, sala chorych, sala operacyjna) lampy pozostawiamy włączone na 2 do 8 godz. Możemy uzyskać wyraźny efekt dezynfekcji powietrza w pomieszczeniu (np. między dwoma zabiegami) włączając lampy na 15 do 20 minut.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 33 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 2,3 W / m²
- trwałość promiennika : 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 270°
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy : IP 20
- rodzaj pracy: ciągła



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- wymiary kopuły: 960 x 85 x 135 mm
- masa kopuły: 3 kg
- długość wysięgnika: 1800 mm
- typ licznika: bez wyświetlacza