



Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 30 S

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: S - sufitowa
- dzięki tej lampie bakteriobójczej podnoszą Państwo poziom czystości mikrobiologicznej
- emitowane promieniowanie: UV-C o długości fali 253,7 nm
- podczas używania tej lampy następuje nieodwracalna dezaktywacja wirusów, pleśni, grzybów oraz drobnoustrojów
- cel: skuteczna dezynfekcja powietrza i powierzchni
- odbłyśnik: element ten jest wykonany z aluminium, co gwarantuje jego najwyższą jakość
- przeznaczenie: tę lampę bakteriobójczą stosuje się w instytutach medycznych, szpitalach oraz przychodniach, a ponadto w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym
- skuteczność tej lampy potwierdzono podczas badań; świadczą o niej również liczne certyfikaty

Wszystkie niezbędne informacje na temat metod i użytkowania tej lampy bakteriobójczej można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Przed zamontowaniem lampy bakteriobójczej NBV 30 S należy ustalić, jakie warunki panują w danym pomieszczeniu. Po pierwsze, trzeba ocenić wilgotność, temperaturę oraz ilość pyłków znajdujących się w powietrzu. Ważna jest również wysokość oraz kształt pomieszczenia. Przed montażem należy także określić, jaką ilość promieniowania odbijają ściany oraz przedmioty znajdujące się w danym pokoju.

Choć nie ma jednej prostej reguły, która pozwalałaby wskazać, jak dobrać lampę bakteriobójczą do pomieszczenia, można przyjąć pewne założenia. Wystarczający stopień czystości mikrobiologicznej uzyska się, montując:

- lampę 15W na pow. do 8 m²
- lampę 2x15W na pow. do 12 m²
- lampę 30W na pow. do 15 m²
- lampę 2x30W na pow. do 22 m²

Te parametry dotyczą pomieszczeń o wysokości do 3 m.

Sale chorych, gabinety lekarskie i zabiegowe oraz sale operacyjne naświetla się lampami bakteriobójczymi od 2 do 8 godzin (w zależności do potrzeb). Urządzenia te stosuje się także w celu uzyskania wyraźnego efektu dezynfekcji, na przykład między dwoma zabiegami, wtedy lampę bakteriobójczą wystarczy włączyć na 20 minut.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 33 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 2,3 W / m²
- trwałość promiennika: 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 230°
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- rodzaj pracy: ciągła
- wymiary kopuły: 960 x 85 x 135 mm
- masa kopuły: 3 kg



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- długość wysięgnika: 500 mm