



Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 30 SLW

Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- typ licznika: LW - licznik cyfrowy z mikroprocesorem z wyświetlaczem 4-polowym LED. Za pomocą dźwięku model ten sygnalizuje konieczność wymiany promiennika. Nasi Klienci bardzo cenią sobie możliwość podłączenia tego licznika do wcześniej zakupionych lamp bezpośredniego działania oraz urządzeń przepływowych
- sposób montażu: S - sufitowa
- wynikiem stosowania tego urządzenia jest podniesienie poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń
- urządzenie to emituje promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm
- działanie tej lampy nieodwracalnie dezaktywuje wszelkie bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz inne rodzaje drobnoustrojów
- cel: dezynfekcja powietrza i powierzchni danego pomieszczenia
- wysokojakościowy odbłyśnik (materiał: aluminium odbłaskowe)
- przeznaczenie: stosowanie na blokach operacyjnych (oraz innych salach szpitalnych), w gabinetach zabiegowych, a także w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz kosmetycznym
- skuteczność tego urządzenia potwierdzają badania oraz liczne certyfikaty
- lampa posiada wszelkie wymagane certyfikaty

Przed zakupem lampy bakteriobójczej bezpośredniego działania powinni Państwo prawidłowo określić warunki panujące w pomieszczeniu. Po pierwsze, trzeba uwzględnić jego wymiary (szczególnie wysokość) i parametry powietrza (temperaturę, wilgotność oraz zapylenie). Poza tym należy ocenić, jaką ilość promieni świetlnych odbijają ściany. Istotny jest również rodzaj drobnoustrojów, które zamierzają Państwo wyeliminować.

Odpowiednią czystość mikrobiologiczną uzyskuje się, stosując w pomieszczeniu do 3 m wysokości:

- lampę 15W na pow. do 8 m²
- lampę 2x15W na pow. do 12 m²
- lampę 30W na pow. do 15 m²
- lampę 2x30W na pow. do 22 m²

Każde pomieszczenie wymaga innego czasu naświetlania. Specjaliści zalecają włączanie lamp bezpośredniego działania w gabinetach lekarskich, salach szpitalnych oraz w pokojach zabiegowych na ok 2 do 8 godzin dziennie. Szybki efekt dezynfekcji powietrza można uzyskać, włączając urządzenie pomiędzy zabiegami na 20 minut.

Pozostałe niezbędne informacje dotyczące obsługi i stosowania tej lampy bezpośredniego zasięgu znajdą Państwo w instrukcji użytkowania.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 33 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 2,3 W / m²
- trwałość promiennika: 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 230°
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- rodzaj pracy: ciągła



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- wymiary kopuły: 960 x 85 x 135 mm
- masa kopuły: 3 kg
- długość wysięgnika: 500 mm
- typ licznika: z wyświetlaczem 4-polowym