



Neuroforma - oprogramowanie do ćwiczeń

Opis produktu

Neuroforma jest dostępna w trzech wersjach:

- **Neuroforma dla pacjentów** – daje możliwość wykonywania różnorodnych ćwiczeń przy użyciu własnego komputera wyposażonego we wbudowaną lub zewnętrzną kamerę internetową.
- **Neuroforma dla terapeutów** – łatwy w obsłudze program komputerowy do ćwiczeń ruchowych i poznawczych, który możesz zainstalować na własnym komputerze i pracować z pacjentami w Twoim gabinecie. Program działa we współpracy z wbudowaną lub zewnętrzną kamerą internetową.
- **Neuroforma dla ośrodków** – nowoczesne stanowisko do ćwiczeń, składające się z dużego wyświetlacza, systemu komputerowego oraz systemu optycznego 3D, umożliwiającego precyzyjną obserwację aktywności pacjentów. Możliwość rozszerzenia o moduł ćwiczeń kontroli równowagi z platformą posturograficzną i barierką asekuracyjną.

Jak działa Neuroforma?

1. Zajmujesz miejsce przed monitorem komputera lub stanowiska.
2. Po uruchomieniu programu Neuroforma, widzisz na ekranie swoje lustrzane odbicie.
3. W zależności od ćwiczenia kierujesz swoim odbiciem by złapać, przesunąć, uderzyć pojawiające się na ekranie przedmioty lub zrobić przed nimi unik.
4. Kamera rejestruje Twoje ruchy, a komputer monitoruje postępy Twoje lub Twoich pacjentów.

Neuroformę współtworzą użytkownicy, dlatego jest przyjazna i łatwa w obsłudze. Poradzisz sobie z uruchamianiem ćwiczeń w Neuroformie, nawet jeśli nie masz biegłości w obsłudze komputera.