

Skaner żył VS400

Serwis



Transport



Opis produktu

Skaner żył - zasada działania:

Skaner żył VS400 działa bezkontaktowo. Urządzenie emituje światło czerwone (podczerwień), które jest pochłaniane przez hemoglobinę zawartą we krwi płynącej w naczyniach krwionośnych. Dzięki temu na skórze po podświetleniu skanerem widzimy żyły pacjenta w czasie rzeczywistym.

VS400 - skaner żył (iluminator naczyń krwionośnych) - korzyści:

Sukces przy pierwszym wkłuciu

Skaner żył VS400 może poprawić skuteczność wkłuć nawet o 100%

Wyższa wydajność

Skaner żył VS400 może zaoszczędzić czas potrzebny na znalezienie żyły, skrócić czas rozpoczęcia kroplówki do 100%

Zwiększenie satysfakcji pacjenta

Skaner żył VS400 zapewnia pacjentom wysoki komfort zabiegu.

Wenopunkcja


Skaner żył może pomóc w skutecznym i dokładnym wykryciu żyły do wenopunkcji.

Zabiegi kosmetyczne

Skaner żył może być wykorzystany do zlokalizowania i ominięcia żył podczas zabiegów kosmetycznych, co pozwoli zminimalizować zasinienia i ewentualną migrację wstrzykiwanych płynów.

Zabiegi naczyniowe

Podczas leczenia żylaków, iluminator naczyniowy może pomóc w ocenie i znalezieniu głębokich żył oraz w lepszym leczeniu.

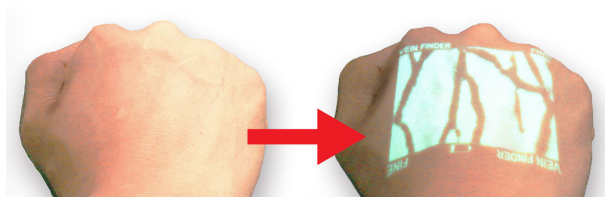

Skaner żył VS400 - zastosowanie:

- pediatria
- onkologia
- radiologia
- SOR
- geriatria
- labolatoria
- chirurgia
- wizyty domowe
- medycyna estetyczna
- chirurgia naczyniowa

Skaner żył VS400 rozwiązuje dotychczasowe problemy z wkłuciem:

Niemowlę



Starszy pacjent



Pacjent otyły



Choroby skóry



Ciemna karnacja



Skóra twarzy



Iluminator naczyniowy VS400 - tryby wizualizacji żył:

KOLOR

Zmiana kolorów wyświetlania obrazu pozwala lepiej uwidocznąć obraz na skórze pacjenta oraz dostosować obraz do własnych preferencji. Dostępne pięć różnych kolorów wyświetlania do wyboru.



INWERSJA

Lekarze mogą lepiej uwidocznić żyły lub wyróżnić otaczającą tkankę dzięki trybowi odwrócenia obrazu żył



JASNOŚĆ

Regulowana jasność umożliwia lekarzom dostosowanie ustawień jasności obrazu bazowego do oświetlenia



ROZMIAR

3 rozmiary obrazu (przydatne przy pacjentach pediatrycznych oraz gdy trzeba skupić się na jednej żyłce).



FINE Mode

FINE Mode

Wzmocnienie obrazu – tryb przydatny przy znajdowaniu małych żył i żył głębokich



Iluminator naczyniowy VS400 - Specyfikacja techniczna