

Urządzenie do suchych kąpeli CO₂ CARBObed



Serwis



Szkolenie



Transport



Opis produktu

CARBObed to polskiej produkcji urządzenie do suchych kąpeli kwasowęglowych.

Kąpiel kwasowęglowa od wielu lat ceniona w uzdrowiskach jako doskonały zabieg dla układu krążenia i układu autonomicznego.

Kąpiele gazowe CO₂ - wskazania:

- nadciśnienie tętnicze
- schorzenia reumatyczne
- choroby układu krążenia
- zaburzenia krążenia w peryferyjnych naczyniach tętniczych
- oparzenia i odmrożenia
- hipotonia i hipertonia
- owrzodzenia podudzia
- gangreny cukrzycowe, arteriosklerotyczne i naczyniokurczowe
- trudno gojące się rany

Najczęstszą formą kąpeli kwasowęglowych są kąpiele mokre. Substytutem dla tego zabiegu, jak się okazało skuteczniejszym i oszczędzającym koszty, stała się **kąpiel kwasowęglowa gazowa (sucha)**.

Podczas zabiegu pacjent kładzie się na specjalnej leżance z kopułą, którą przykrywa się dolną część ciała pacjenta. Za pomocą gumowego płaszcza uszczelniamy komorę zabiegową. Zabieg rozpoczyna się po uruchomieniu urządzenia do suchej kąpeli kwasowęglowej z panelu sterowniczego znajdującego się przy kopule. Kąpiel kwasowęglowa sucha przebiega automatycznie i urządzenie informuje nas o zakończonym zabiegu.

Zalety suchych kąpeli kwasowęglowych w porównaniu z kąpielami wodnymi:

- możliwość wykonywania zabiegu bez rozbierania pacjenta
- znacznie mniejsze zużycie gazu niż przy kąpielach w CO₂
- skrócenie czasu przygotowania zabiegu (brak konieczności napełniania i opróżniania wanny)
- łatwiejsza instalacja urządzenia (niepotrzebne doprowadzenie i odprowadzenie wody)
- skuteczniejsze działanie w wybranych schorzeniach
- znacznie mniej przeciwwskazań
- udokumentowana wyższa skuteczność leczenia (patrz. badania naukowe)

Charakterystyka aparatu CARBObed:

- automatyzowany przebieg zabiegu
- skuteczne i szybkie uszczelnianie komory zabiegowej
- automatyczne uzupełnianie CO₂ oraz cyrkulacja gazu pod kopułą aparatu zapewnia wysokie skoncentrowanie gazu na obiekcie zabiegu
- automatyczne nawilżanie i ogrzewanie CO₂ zwiększa efektywność zabiegu od momentu jego rozpoczęcia
- temperatura zabiegu regulowana w zakresie 30-40°C (+/- 1°)
- sygnalizacja dźwiękowa zakończenia zabiegu
- zużycie CO₂ kilkadziesiąt razy mniejsze niż w przypadku kąpeli kwasowęglowej mokrej
- kontrolowane odprowadzenie CO₂ po zakończeniu zabiegu
- mobilna konstrukcja urządzenia
- regulowane pochylenie podglówka
- wymiary (dł.x szer.x wys.) 2150 x 700 x 980 mm



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- wysokość leżyska: 590 mm
- waga: 80kg
- zasilanie 230 V/50 Hz, 800 VA

Zobacz jak wygląda zabieg urządzeniem do suchych kąpeli kwasowęglowych:

Sanatorium "Pod Tężniami" Ciechocinek